

Kaleido mit DBLG1 zu DBLG2 Übergangstraining

mit dem Kaleido Controller



Willkommen bei Kaleido mit DBLG2!

Du hast bereits mit DBLG1 erlebt, was die Hybrid-Closed-Loop-Therapie leisten kann. Jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt.

DBLG2 baut auf deinem bisherigen Wissen auf und führt gleichzeitig neue Funktionen ein, eine neue Art, deine Kaleido-Insulin-Patch-Pumpe über den Kaleido-Controller zu steuern, sowie ein überarbeitetes Benutzererlebnis.

Diese Schulung soll dich durch den Übergang begleiten. Es geht nicht darum, alles von Grund auf neu zu lernen – sondern darum, zu verstehen, was neu ist, wie du DBLG2 vom ersten Tag an optimal nutzen kannst und wie du den Übergang meisterst.

Hier findest du:

- **Kapitel 1 – Zusätzliche Schulung für DBLG1-Nutzer zum Wechsel zu DBLG2**
Dieses Kapitel enthält alles, was in DBLG2 neu ist – die wichtigsten Unterschiede zu DBLG1 und die Funktionen, die du täglich nutzen wirst.
- **Kapitel 2 – Schulung zum Kaleido-Controller**
Den Kaleido-Controller kennenlernen – alles, was du brauchst, um sicher mit dem Gerät umzugehen, auf dem DBLG2 läuft.
- **Kapitel 3 – Umstieg von DBLG1 auf DBLG2**
Der Umstieg – eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir hilft, reibungslos von DBLG1 auf DBLG2 umzusteigen.
- **Checkliste für den Umstieg Bist du bereit?**
Bitte unterschreibe die Checkliste und sende sie an deinen Fachhändler zurück, um zu bestätigen, dass du die Schulung abgeschlossen und die Informationen verstanden hast.

Nimm dir Zeit, jedes Kapitel durchzuarbeiten. Und denk daran: Du bist bei diesem Übergang nicht auf dich allein gestellt. Nimm über den untenstehenden QR-Code an einem der Übergangs-Webinare teil. Und wenn du Fragen hast oder unterwegs Hilfe brauchst, steht dir dein Fachhändler Care-Team gerne zur Seite. Wir möchten, dass du dich bei jedem Schritt sicher fühlst – zögere also nicht, dich zu melden, wenn du uns brauchst.



Nimm an einem der Übergangs -Webinare teil

Kapitel 1

Zusatzschulung für DBLG1-Anwender für den Wechsel zu DBLG2



Zweck der Schulung

DBLG2 ist eine **Smartphone-App-Version** des DBLG1-Systems. Die allgemeine **Funktionsweise und die Indikationen sind absolut identisch**. Der Zweck dieser Zusatzschulung ist es, dir alle zusätzlichen Informationen bereitzustellen, die du für einen einfachen und reibungslosen Wechsel von DBLG1 zu DBLG2 benötigst.

DBLG2-System

Systemübersicht




- Das DBLG2-System arbeitet mit dem **Dexcom G7** Glukosesensor und der **Kaleido Insulinpumpe** zusammen.
- Bluetooth® **muss immer aktiviert bleiben**. Achte darauf, einen maximalen Abstand **von 10 Metern** zwischen der Pumpe bzw. dem Sensor und dem Smartphone einzuhalten.
- Deine Daten werden automatisch über **mobile Daten oder WLAN** auf YourLoops hochgeladen.
- Deine App kann nur auf **einem einzigen Smartphone verwendet werden**.

App-Navigation


Neu

Die DBLG2-App verfügt über vier Hauptbildschirme, die du jederzeit über die untere Navigationsleiste aufrufen kannst.

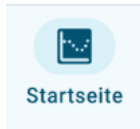


Startseite

- Anzeige **wichtiger Informationen**.
- **Schaltfläche „Ereignis hinzufügen“**.

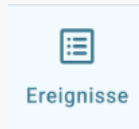


Ereignisse

- Anzeige des **Ereignisverlaufs** und **Bearbeitung von Ereignissen** (falls möglich).
- **Schaltfläche „Ereignis hinzufügen“**.

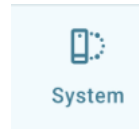

System

- **Informationen über den Glukosesensor oder die Pumpe anzeigen und verwalten** (z. B. Sensor ersetzen, Pumpe wechseln)
- **Loop-Modus EIN- oder AUSSchalten**.

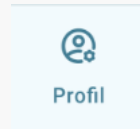


Profil

- Anzeigen und Anpassen deines Profils und deiner **Einstellungen**.

Benachrichtigungen

Neu

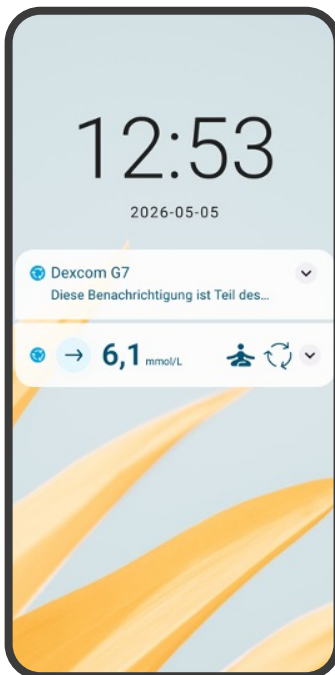


Deine Glukosewerte, der Glukosetrend und der Status des Loop-Modus werden auf deinem Telefon immer als permanente Benachrichtigung angezeigt. Andere Informationen wie aktive Modi oder laufende Ereignisse erscheinen nur dann, wenn sie relevant sind. *Möglicherweise musst du deinem Telefon zusätzliche Berechtigungen erteilen, damit private Daten auch auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden können.*

Es gibt außerdem **eine permanente Dexcom-Benachrichtigung, die nicht entfernt werden darf**, damit der Sensor einwandfrei funktioniert.

WARNUNG: Diese Benachrichtigung muss zwingend **aktiv bleiben!** Nur so wird verhindert, dass dein Smartphone die App im Hintergrund schließt und damit die kontinuierliche Glukosemessung stoppt.


Schließlich nutzt die DBLG2-App die Benachrichtigungen deines Telefons auch, um dich bei Bedarf zu alarmieren (siehe Abschnitt über das Alarmsystem).

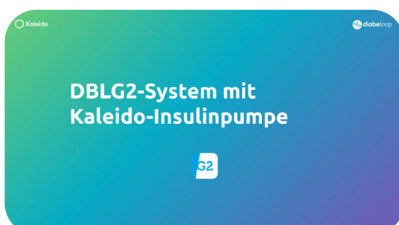

Sieh dir das Video an, um mehr zu erfahren.




Der Startbildschirm

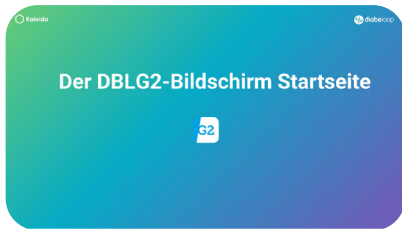

Sieh dir das Video an,
um mehr zu erfahren.



Auf dem Bildschirm Startseite werden der Status der Geräte, deine Glukosewerte, Informationen zur Insulinabgabe und deine Ereignisse angezeigt. Du hast hier auch Zugriff auf die Schaltfläche „Ereignis hinzufügen“

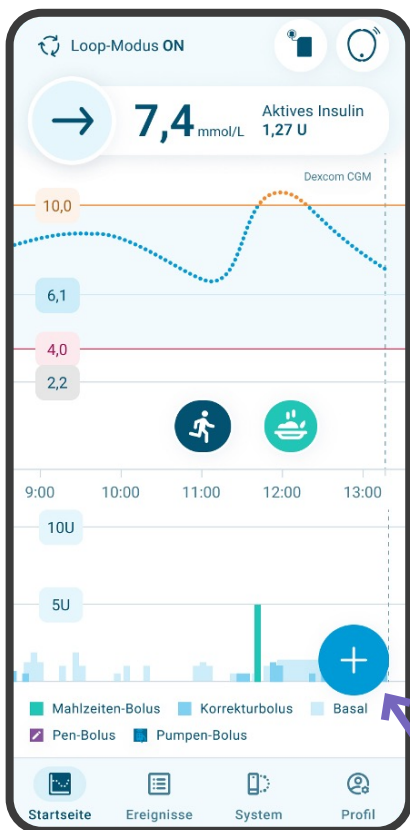

Status der Systemgeräte

Tippe einfach auf die Symbole, um direkt zum Bildschirm System zu gelangen und bei Bedarf mehr Informationen zu sehen.

Der aktuelle Messwert und der Trendpfeil (im Banner) sowie die Verlaufskurve der Glukosewerte.

Die Farbe der Kurve und des Glukosebanners ändert sich automatisch je nach deinen Werten.

Temporäre Informationen werden ganz oben in der Grafik angezeigt (und ein kleines Symbol erscheint auf dem Startseite-Icon)

Ereignisverlauf

Den vollständigen Ereignisverlauf findest du auf dem Bildschirm Ereignisse.

Informationen zur Insulinabgabe

Schaltfläche
„Ereignis
hinzufügen“

Pen-Bolus



Pumpen-Bolus



Notfall-KH



Körperliche Aktivität



Mahlzeit




Genau wie beim DBLG1 kannst du hier eine **Mahlzeit***, eine **körperliche Aktivität**, **Notfall-KH** oder einen **Pen-Bolus** eingeben. Du hast hierüber auch Zugriff auf die Verknüpfung zum **Pumpen-Bolus**.

* Neu bei DBLG2: Du kannst hierbei die genaue Art der Mahlzeit spezifizieren.

Der Ereignisbildschirm

Der Bildschirm Ereignisse listet alle **vom Anwender manuell eingegebenen** oder **vom System automatisch ausgelösten Ereignisse** übersichtlich auf.

Du kannst hier Informationen einsehen und – falls möglich – Einträge bearbeiten. Laufende Aktivitäten oder Bolusabgaben können hier direkt gestoppt werden. Du hast von hier aus ebenfalls Zugriff auf die Schaltfläche „Ereignis hinzufügen“.

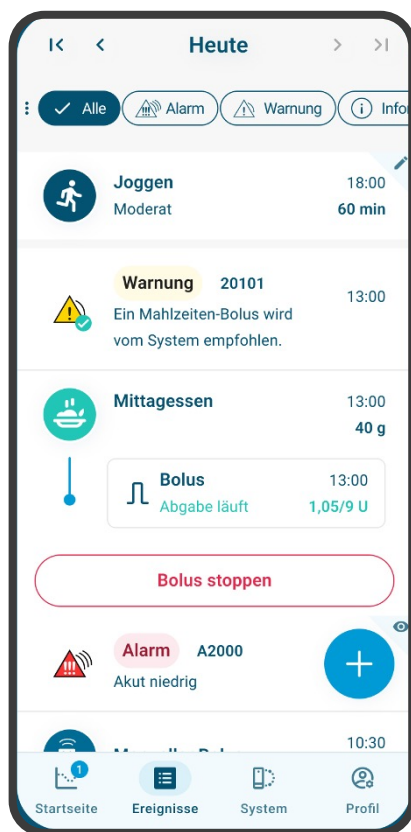

Zukünftige Ereignisse werden immer oben auf dem Bildschirm angezeigt und sind von vergangenen Ereignissen durch eine dicke graue Linie getrennt.

Ereignisse, **die bearbeitet werden können**, sind durch das Symbol  gekennzeichnet. Tippe auf das Ereignis, um es zu bearbeiten.

Ereignisse ohne das Symbol  können nicht bearbeitet werden

Wenn du auf einen Alarm mit dem Symbol  tippst, werden **weitere Informationen über den Alarm und die zu ergreifenden Maßnahmen zur Behebung des Problems** angezeigt.




Sieh dir das Video an, um mehr zu erfahren.



Der Systembildschirm

Über den Bildschirm „System“ können Sie Ihre **Geräte steuern** und **die automatische Insulinabgabe starten**.

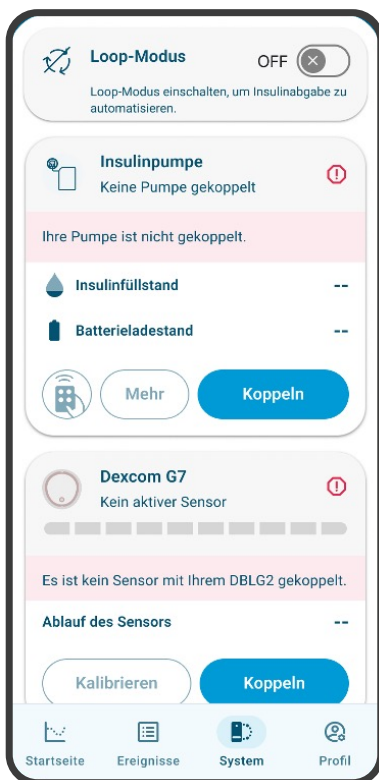

Bereich „Loop-Modus“


Hier aktivierst oder deaktivierst du den Loop-Modus.

Bereich „Insulinpumpe“

Hier koppelst oder stoppst du deine Insulinpumpe und steuerst deine Pumpe manuell.

Bereich „CGM“


Hier koppelst oder wechselst du deinen Glukosesensor und führst Kalibrierungen durch.

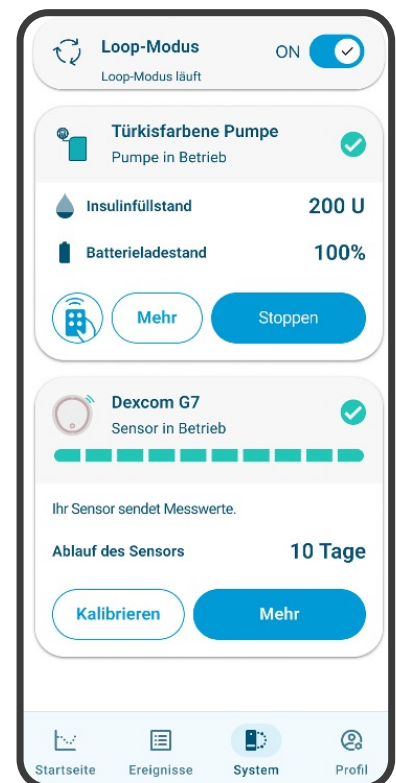

- **Der Status jedes Elements** wird direkt unter dem jeweiligen Titel des Abschnitts angezeigt.
- **Zusätzliche Informationen** sind jeweils über die Schaltfläche „Mehr“ für jedes Gerät verfügbar.



Wenn du deine Geräte koppelst, **musst du die Bluetooth-Pop-ups auf deinem Smartphone zwingend akzeptieren**, um die Verbindung zu erlauben.

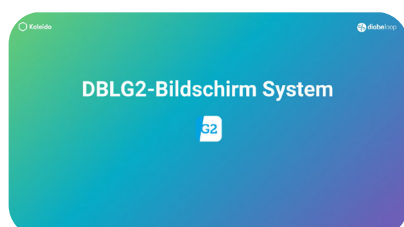


Sieh dir das Video an, um mehr zu erfahren.



Dexcom G7

Neu

- **Komplettsensor:**
 - Applikator, Sensor und Transmitter fest integriert.
- **Wenn der Dexcom G7 zusammen mit der DBLG2-App genutzt wird, kann er nicht mehr mit der originalen Dexcom G7-App verwendet werden. Um Konflikte oder Probleme zu vermeiden, deinstalliere die Dexcom-App vollständig, bevor du mit DBLG2 startest.**

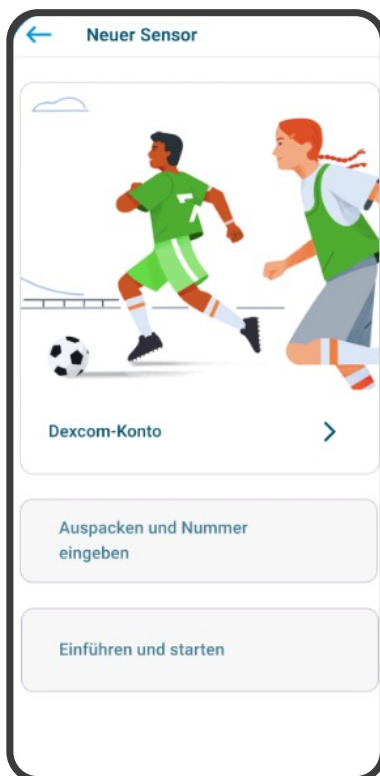

- **Dexcom G7-Kopplung**
 - **Für die Kopplung eines Sensors mit DBLG2 ist ein Dexcom-Konto erforderlich:**
 - **Erstelle dein Konto oder logge dich direkt über DBLG2 ein.**
 - Gib deinen Sensor-Code ein.
 - Setze deinen G7-Sensor und verbinde das Gerät.
 - **Du musst das Bluetooth-Pop-up akzeptieren, um den Sensor zu koppeln.**
 - Aufwärmphase: 30 Minuten.

Alle Schritte zum Auspacken und Einrichten deines G7-Sensors werden dir direkt in der App anschaulich erklärt. Folge einfach den Schritt-für-Schritt-Anweisungen.

- **10-tägige Sensorsitzung + 12-stündige Toleranzzeit:**
 - Die Toleranzzeit verschafft dir mehr Flexibilität für das Ersetzen deines Sensors, sodass du den Wechsel ganz bequem während dieses Zeitraums vornehmen kannst, wenn es dir am besten passt.
 - Um den Sensor zu ersetzen, tippst du einfach auf System > Mehr > Ersetzen (oder Stoppen).


Während der Toleranzzeit funktioniert dein Sensor nahtlos genauso weiter wie während der regulären Sensorsitzung.

Das Alarmsystem benachrichtigt dich automatisch, sobald die Toleranzzeit beginnt und endet. Deine persönlichen Präferenzen hierzu kannst du unter *Profil > Benachrichtigungen > G7-Sensorwarnungen* einstellen.



Bildschirm Profil

Der Bildschirm Profil ermöglicht es dir, deine DBLG2-App anzupassen und behandlungs- sowie app-bezogene Informationen einzusehen.

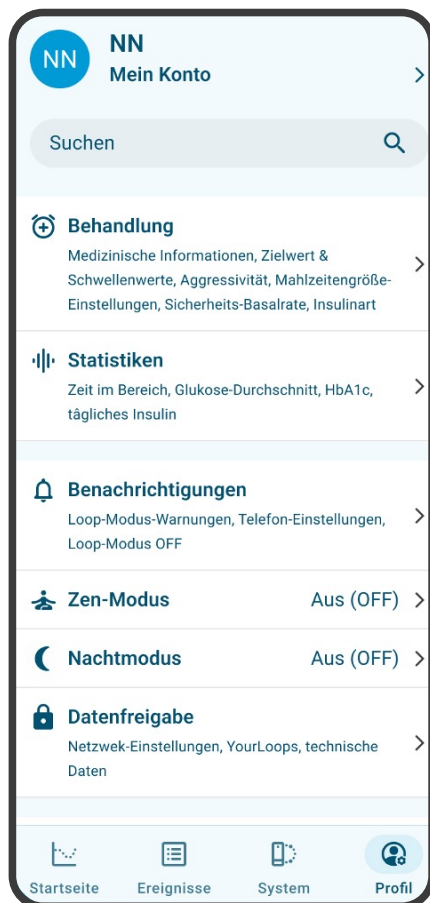

Personenbezogene Daten

Aktualisierung deiner persönlichen Daten sowie Änderung deiner YourLoops-E-Mail-Adresse und/oder deines Passworts.

Verwaltung deines Kontos (Abmelden bei einem Smartphone-Wechsel, Löschen deines Kontos, um die Nutzung von DBLG2 komplett zu beenden).

Medizinische Informationen

Aktualisierung deiner medizinischen Daten und Anpassung der Parameter zusammen **mit deinem Arzt oder Diabetologen**.

Benachrichtigungen konfigurieren. Einige Warnungen können so eingestellt werden, dass sie selbst dann ertönen, wenn der „Nicht stören“-Modus aktiviert ist*.

Zen-Modus konfigurieren und einschalten.

Nachtmodus konfigurieren und einschalten*.

Neu

Datenfreigabe konfigurieren*.

Hilfe zu den verschiedenen Systemkomponenten erhalten / **auf das Benutzerhandbuch zugreifen**. Entriegele deine Pumpe

Nachtmodus

Neu

Dieses Menü ermöglicht es dir, **einen benutzerdefinierten Zeitbereich für die Nachtzeit festzulegen**.

Es ist möglich, die „Nachtzeit“ für jede beliebige Tageszeit mit einer maximalen Dauer von 12 Stunden einzustellen. Wenn der Nachtmodus eingeschaltet ist, wird er **jede Nacht** automatisch zu der von dir festgelegten Uhrzeit eingeschaltet.

Während dieser Nachtzeit werden die folgenden Alarme/Warnungen weniger aufdringlich.



Alarm/Warnung

Verhalten im Nachtmodus

21000 Keine Glukosemesswerte seit über 30 Minuten

Wird ausgelöst, wenn mehr als 120 Minuten lang keine Messwerte empfangen wurden.

22000 Loop-Modus konnte nicht starten

Wird nie in der Nacht ausgelöst.

20300 Notfall-KH werden empfohlen

Die Hypoglykämiegrenze, bei der diese Warnung normalerweise ausgelöst wird, wird um 10 mg/dL / 0,6 mmol/L gesenkt.

Datenfreigabe

Das Ausschalten des Datentransfers entspricht dem vertraulichen Modus (Confidential-Modus) auf dem DBLGI. Die während des „Aus“-Zeitraums erfassten Daten werden nur in deiner App gespeichert und sind auf YourLoops nicht sichtbar.

Du kannst **WLAN als deine bevorzugte Methode** für den Datentransfer auswählen.

Neu


Hilfe

Dieser Bereich bietet dir Zugriff auf ein **Hilfemenü** und eine vollständige PDF-Version des Benutzerhandbuchs.

Neu

Alarmsystem

Neu

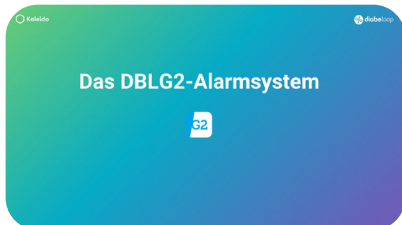

Sieh dir das Video an,
um mehr zu erfahren.



Neue Symbole werden angezeigt, haben aber die gleiche Bedeutung:



Alarm: erfordert **sofortige Aufmerksamkeit**




Warnung: Behebe dies **so schnell wie möglich**



Informationsmeldung: gibt Informationen über dein System




Alarme, Warnungen und Informationsmeldungen werden wie **jede Benachrichtigung auf deinem gesperrten oder entsperrten Telefon ausgelöst.**

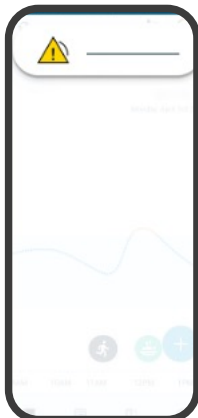

Warnungen und Informationsmeldungen folgen den Ton- und Vibrationseinstellungen deines Telefons, wenn die Benachrichtigung ausgelöst wird (Lautlos-Modus, Vibrationsmodus, Klingelmodus).

Vier Warnungen können unter Profil > Benachrichtigungen so konfiguriert werden, dass sie immer ertönen, selbst wenn sich dein Telefon im Lautlos-Modus oder im „Nicht stören“-Modus befindet.

Warnungen und Informationsmeldungen haben im Allgemeinen keinen eigenen Bildschirm innerhalb der App. Du **kannst sie in deiner Benachrichtigungszentrale finden und das Ereignis über die Benachrichtigung verwalten.**

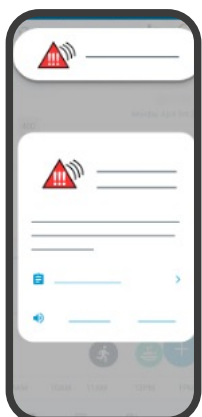

Ein Alarm ertönt unabhängig von der Konfiguration deines Telefons, wenn die Alarmbenachrichtigung ausgelöst wird.

Bei Alarmen erscheint ein Pop-up-Fenster auf deinem entsperrten Bildschirm. Du kannst den Ton direkt im Pop-up stummschalten (oder indem du die Benachrichtigung öffnest).


Tippe auf **Mehr Informationen**, um zu sehen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um das Problem zu beheben.

Du findest alle Ereignisse auf dem **Bildschirm Ereignisse**.

Konto-, App- und Telefonverwaltung

Konto verwalten

Neu

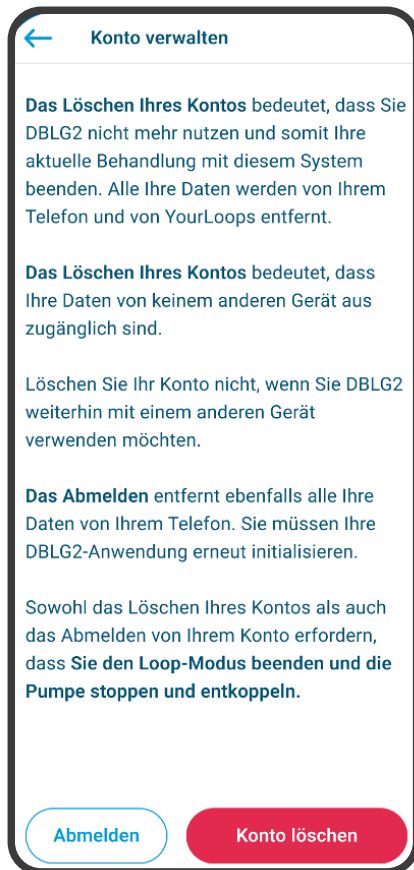

Abmelden für einen Smartphone-Wechsel

Folge den Bildschirmanweisungen, um deine Pumpe zu stoppen und zu entkoppeln.

Installiere als Nächstes die App auf dem neuen Telefon und initialisiere sie mit demselben Aktivierungscode, deinen YourLoops-Anmeldedaten und denselben Einstellungen oder mit der Unterstützung deiner medizinischen Fachkraft.

Das Löschen deines Kontos beendet die DBLG2-Behandlung dauerhaft

Alle deine Daten werden von deinem Telefon gelöscht und sind auf YourLoops nicht mehr zugänglich.

Wenn du die Nutzung von DBLG2 beenden möchtest, kontaktiere deine medizinische Fachkraft oder deinen Vertriebspartner, um deinen Aktivierungscode deaktivieren zu lassen. Die App stoppt dann automatisch.

WARNUNG: Wir raten dir davon ab, dich abzumelden oder dein Konto zu löschen, wenn du die App weiterhin nutzen möchtest, da hierdurch alle App-Daten gelöscht werden und du erneut mit der Initialisierungsphase beginnen musst. Zudem kannst du dich nach dem Löschen deines Kontos nicht mehr mit YourLoops verbinden.

App-Updates

Neu



Wenn ein App-Update verfügbar ist, **wird eine vorübergehende Meldung aus dem App Store auf deinem Startbildschirm angezeigt.**

Tippe auf die Meldung und lade die neueste Version herunter und installiere sie, wenn es für dich passend ist.

Nach einem App-Update solltest du:

- überprüfen, ob sich der Sensor und die Pumpe automatisch wieder verbunden haben und richtig funktionieren.
- den Loop-Modus aktivieren, falls er ausgeschaltet ist.

Du kannst automatische Updates im Google Play Store > DBLG2 über die drei Punkte in der oberen rechten Ecke deaktivieren

Updates des Smartphone-Betriebssystems

Neu

Wenn dein Telefon anzeigt, **dass ein neues Betriebssystem-Update verfügbar ist, überprüfe im Benutzerhandbuch, ob die DBLG2-App kompatibel ist** (Profil > Hilfe und Kontakt).

WARNUNG: Aktualisiere dein Telefon nicht auf eine nicht unterstützte Version des Betriebssystems. Warte, bis Diabeloop bestätigt, dass das Update deines Betriebssystems sicher ist.

Nach einem Betriebssystem-Update auf deinem Telefon solltest du:

- die App neu starten.
- alle neuen erforderlichen Berechtigungen gewähren, die eventuell angefordert werden.
- überprüfen, ob sich der Sensor und die Pumpe automatisch wieder fehlerfrei verbunden haben und richtig funktionieren.
- den Loop-Modus aktivieren, falls er ausgeschaltet ist.

Wie wird DBLG2 nach dieser Schulung installiert?

Der Initialisierungsprozess ist dem von DBLG1 sehr ähnlich.

Die Hauptunterschiede betreffen die Anforderungen an das Smartphone.

Eine Schritt-für-Schritt-Dokumentation wird dir nach der Validierung dieser Schulung bereitgestellt, falls du DBLG2 selbst installieren möchtest.

1. **Trage all deine medizinischen Informationen aus DBLG1 oder YourLoops zusammen**
2. **Lade die DBLG2-App herunter, sobald du deinen persönlichen Aktivierungscode hast (bereitgestellt von deiner medizinischen Fachkraft oder deinem Vertriebspartner).**


- Lade die DBLG2-App aus dem **offiziellen App Store** herunter, vorausgesetzt, du hast:



- ein **kompatibles Smartphone** (die Liste ist auf der Diabeloop-Website verfügbar).
 - mit einem **Android-Betriebssystem der Versionen 13 bis 16**.
- Vor dem Starten der DBLG2-App musst du sicherstellen, **dass dein Smartphone mit dem Internet verbunden ist** (WLAN oder mobiles Netzwerk).
 - Die App kann nur auf jeweils **einem Smartphone verwendet werden**.

3. Den Initialisierungsbildschirmen folgen

- Während der Initialisierung **musst du ganz nach unten bis zum Ende des Bildschirms scrollen**, um zum nächsten zu gelangen.
- Du musst warten, bis der vollständige Soundcheck abgeschlossen ist, bevor du fortfährst.
- **Tippe auf „Anmelden“ und gib deine Anmeldedaten (E-Mail) und das Passwort ein, das du für DBLG1/YourLoops verwendet hast.**
- Gib deinen **Aktivierungscode** ein.
- **Gib deine medizinischen Informationen sorgfältig ein, basierend auf den Daten, die du in Absprache mit deiner medizinischen Fachkraft auf dem DBLG1 hattest.** Wenn du Probleme bei der Eingabe der Informationen hast, wende dich an deinen Vertriebspartner.
- **Gewähre alle erforderlichen Berechtigungen** (z. B. Aufhebung des „Nicht stören“-Modus, uneingeschränkte Akku-Nutzung) und tippe auf Weiter.

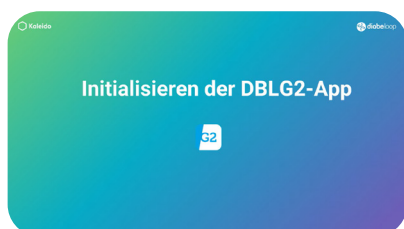

Sieh dir das Video an, um mehr zu erfahren.



Sobald die Initialisierung abgeschlossen ist, musst du deinen Glukosesensor und deine Pumpe koppeln und den Loop-Modus einschalten (ON).

4 Berechtigungen niemals entziehen

Damit die App ordnungsgemäß funktioniert, fordert sie bestimmte Berechtigungen an, die du nicht entziehen solltest. Wenn du eine dieser Einstellungen änderst oder die Anweisungen nicht befolgst, kann die App einen Alarm auslösen oder deine Nutzung blockiert werden.

- Bluetooth® immer EIN
 - Smartphone immer gesichert (z. B. PIN-Code)
 - Smartphone auf automatischer Uhrzeit
 - Benachrichtigungen immer EIN
 - Keine Einschränkung bei der Akku-Nutzung
-
- App-Daten werden niemals gelöscht
 - Aktive Internetverbindung: WLAN oder mobile Daten
 - Aktualisiere dein Telefon nicht auf eine nicht unterstützte Version des Betriebssystems

Dieses Dokument basiert auf Inhalten, die ursprünglich von Diabeloop entwickelt wurden (Dokumentenummer: DBLG2-ED-TM-005-de-Rev0). Die Inhalte wurden mit aktualisiertem Branding und aktualisierter Formatierung für die Verwendung in diesem Dokument übernommen.



Das DBLG2-System ist nur auf Rezept erhältlich. Das Benutzerhandbuch ist das maßgebliche Referenzdokument für die sichere Verwendung des Systems.

Das DBLG2-System ist ein Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung. Die Abbildungen können je nach Konfiguration (z. B. den Einheiten) oder dem verwendeten Smartphone variieren.

Kapitel 2

Kaleido Controller Schulung

Bestimmungsgemäße Verwendung & Datenschutz

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bereitstellen und Ermöglichen der Ausführung autorisierter medizinischer Software in einer kontrollierten Umgebung, einschließlich der notwendigen Funktionen für Konnektivität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, um eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten.

Der Kaleido Controller selbst führt keine Messungen durch, berechnet keine Therapie, bestimmt keine Dosierung, interpretiert keine Daten und bietet keine klinische Unterstützung bei der Therapieentscheidung.

Datenschutz

Der Kaleido Controller verarbeitet Daten gemäß der Datenschutzrichtlinie von ViCentra. Die Richtlinie ist über die Benutzeroberfläche des Controllers (Menü 'Rechtliches') zugänglich und für die Nutzung des Geräts erforderlich.


The policy is accessible through the Controller interface ('Legal' menu) and necessary for the use of the device.

Allgemeines

- Der Kaleido Controller sollte während der Nutzung von DBLG2 immer eingeschaltet bleiben.
- Vor der Verwendung des Kaleido Controllers ist das Benutzerhandbuch zu lesen.
- Der Controller wird mit bereits aufgebrachter Displayschutzfolie, einer Schutzhülle und einem Ladekabel geliefert (Netzteil nicht enthalten).
- Es wird empfohlen, während der Nutzung von DBLG2 nicht zwischen dem Kaleido Controller und einem persönlichen Smartphone zu wechseln. Ein Gerätewechsel erfordert, dass der Algorithmus neu lernt und ein neuer Dexcom G7 gekoppelt wird. Wenn ein Gerätewechsel erforderlich ist, kontaktiere bitte den Fachhändlerkundendienst.
- Möglicherweise müssen die Geräte nach dem Auspacken auf die neueste Softwareversion aktualisiert werden
- Über die Q&A-Schaltfläche gelangst Du zum Wissenszentrum auf der Kaleido-Website. Dort findest Du das Benutzerhandbuch, FAQs und Trainingsvideos.



Einstellungen

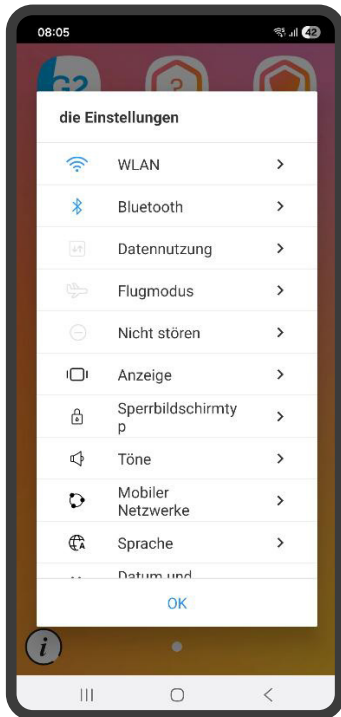

Verwende den Info-Button 'i', um zu den Einstellungen zu gelangen

Hinweis: Es sind nur die sichtbaren und zugänglichen Einstellungen zur Verwendung auf dem Kaleido Controller vorgesehen. Versuche nicht den Kiosk-Modus zu umgehen oder Einstellungen außerhalb der Benutzeroberfläche zu ändern, da dies die Integrität und den sicheren Betrieb des Geräts beeinträchtigen kann.

Laden & Konnektivität




Der Kaleido Controller muss ausreichend geladen sein, um den erwarteten Nutzungszeitraum abzudecken. Wenn eine Warnung bei niedrigem Batteriestand angezeigt wird, lade den Kaleido Controller so schnell wie möglich, um die Kontinuität der Therapie sicherzustellen.

Tipp: Lade den Kaleido Controller über Nacht. Lade ihn gemäß dem Benutzerhandbuch des Smartphone-Herstellers und verwende eine kompatible USB-C-Stromquelle.

Halte den Kaleido Controller in Reichweite der Kaleido Insulinpumpe und des Dexcom G7. Wenn der Kaleido Controller einen Verbindungsverlust anzeigt, stelle die Verbindung umgehend wieder her, indem Du die Geräte näher zusammenbringst und die Wiederherstellung der Verbindung bestätigt wurde.

Wi-Fi und Bluetooth®

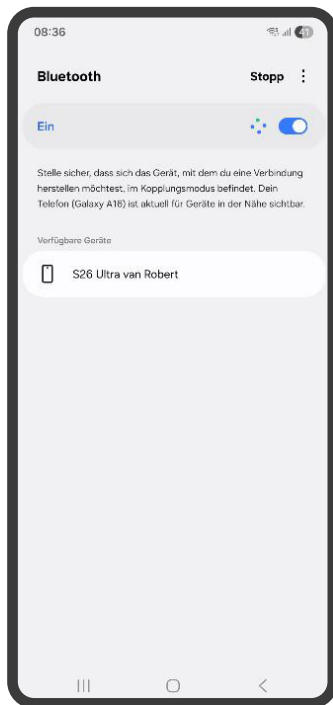

Bluetooth® muss stets aktiviert sein, damit DBLG2 funktioniert.


Der Kaleido Controller benötigt für die tägliche Nutzung mit der DBLG2-App keine aktive Internetverbindung. Eine Internetverbindung (WLAN oder mobiler Hotspot) ist jedoch in folgenden Situationen erforderlich:

- Initialisierung: Einrichtung der DBLG2-App bei der ersten Nutzung des Kaleido Controller.
- Teilen von Therapiedaten: Teilen der bisherigen Therapiedaten an Dein Diabetesteam über YourLoops.
- Software-Updates: Aktualisierung der Software des Kaleido Controllers oder der DBLG2-App.

Um eine reibungslose Nutzung sicherzustellen und von den neusten Software-Updates zu profitieren, verbinde Dich regelmäßig (mindestens einmal im Monat) mit einem sicheren WLAN-Netzwerk.

Der Kaleido Controller enthält keine SIM-Karte.

Sprache

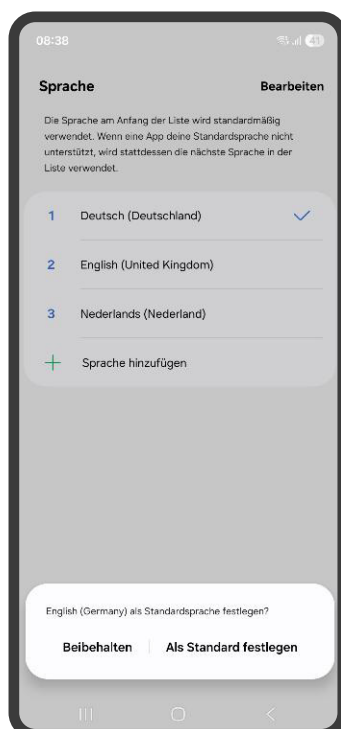


Die Standardsprache des Kaleido Controllers ist Englisch.

Um die Standardsprache zu ändern, gehe in den Einstellungen auf 'Sprache'.

Tippe auf 'Sprache hinzufügen', wählen Sie die gewünschte Standardsprache aus und bestätige diese.

Beim ersten Aktivieren des Flugmodus muss Bluetooth® manuell wieder eingeschaltet werden.


Nicht stören und Töne

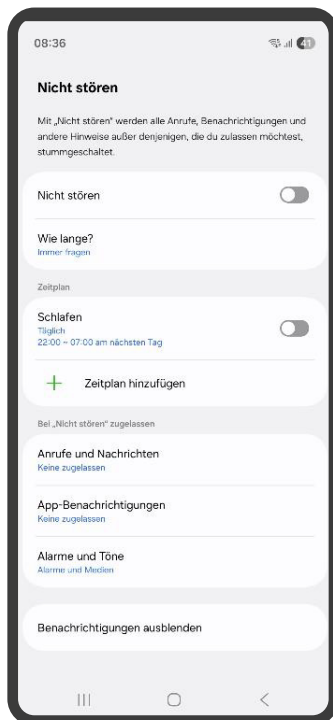

Verwende **‘Nicht stören’**, um Benachrichtigungen und Warnungen stummzuschalten.

Es können **4 Warnungen festgelegt werden**, die immer einen Ton ausgeben – auch im ‚Nicht stören-Modus.


Außerdem kann ein Zeitraum festgelegt werden, in dem der ‚Nicht stören‘-Modus aktiv ist.

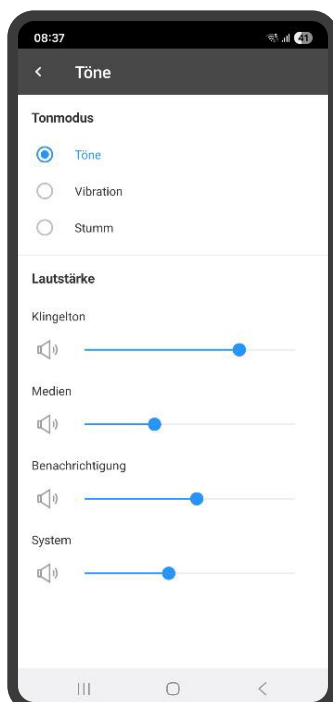

Passe die **Töne für Warnungen** und Benachrichtigungen über die Klingeltonlautstärke an.

Die seitlichen Lautstärketasten des Geräts steuern diese Einstellungen nicht.

Datum und Uhrzeit

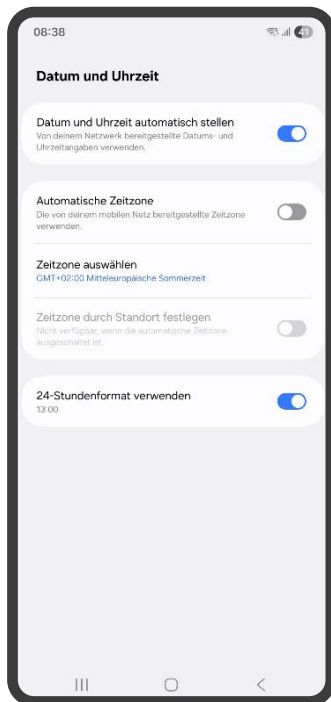

‘Automatisches Datum und Uhrzeit’ und ‘Automatische Zeitzone’ sollten aktiviert bleiben.

Ohne Internetverbindung (WLAN oder Hotspot) muss die Zeitzone manuell eingestellt werden (basierend auf dem Standort), damit DBLG2 funktioniert.


Meldungen



Meldungen (Alarmer, Warnungen und Benachrichtigungen) werden auf dem Sperrbildschirm angezeigt.


Tippe auf die Meldung, um die DBLG2-App zu öffnen und weitere Informationen anzuzeigen

Bildschirmsperre und Display

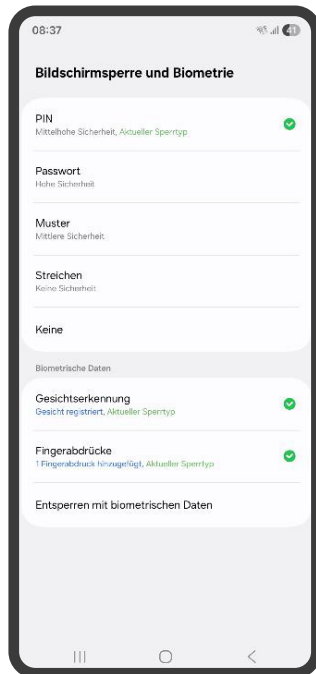

Es muss eine primäre Sicherheitsmethode (**z.B. Code, PIN oder Muster**) eingerichtet sein.

Falls verfügbar, nutze zusätzlich eine biometrische Authentifizierung (z.B. Fingerabdruck oder Gesichtserkennung), um das Gerät im Bedarfsfall schnell zu entsperren.

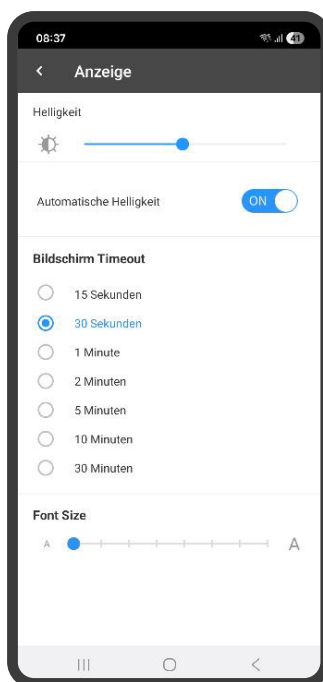

Anpassung der Displayeinstellungen (Helligkeit, Bildschirm-Timeout, Schriftgröße).

App Installation und Betriebssystem-Updates

Die Installation oder die Änderung von Apps ist blockiert. Betriebssystem-Updates können auf das Gerät übertragen werden und müssen von der Nutzerin/vom Nutzer zu einem geeigneten Zeitpunkt bestätigt werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Verwende den Kaleido Controller **nicht**, wenn er sichtbar beschädigt ist (z.B. ein gesprungenes Display). Beende die Nutzung und wende Dich an den Fachhändler oder den Kaleido Care Kundendienst.

Der Kaleido Controller darf nur von der vorgesehenen Nutzerin/vom vorgesehenen Nutzer oder von einer betreuenden Person im Auftrag der Nutzerin/des Nutzers bedient werden.



Kapitel 3

Von DBLG1 zu DBLG2



Von DBLG1 zu DBLG2

Dieses Memo wurde speziell für Anwender entwickelt, die von DBLG1 zu DBLG2 wechseln.



WICHTIGE HINWEISE

Starte oder initialisiere die App nicht selbst, bevor du den Aktivierungscode von deinem Fachhändler oder Diabetesteam erhalten hast. Wenn du die Benutzeroberfläche erkunden und sehen möchtest, wie die App derzeit aussieht, ist die DEMO-App genau das Richtige dafür.



WICHTIGE HINWEISE

Um die Verbindung zwischen deinem vorherigen System (DBLG1) und dem neuen System (DBLG2) zu gewährleisten, **musst du dieselbe YourLoops-E-Mail-Adresse verwenden**.
Wenn du dein Passwort vergessen hast, nutze das Verfahren „Passwort zurücksetzen“ bei der Anmeldung in DBLG2.
Wenn du deine E-Mail-Adresse ändern möchtest, kannst du dies nach der Einrichtung deiner DBLG2-App tun.

WARNUNG: Es ist zwingend erforderlich, die Reihenfolge der Schritte im folgenden Verfahren einzuhalten.

Schritt 0: Vor dem Übergang

Überprüfe, ob dein Smartphone mit DBLG2 kompatibel ist.

- Die App ist mit den Android-Betriebssystemen 13 bis 16 kompatibel.
- Du musst die Liste der kompatiblen Geräte hier überprüfen:

<https://www.dbl-diabetes.de/dblg2-smartphone-complis-android>

Stelle sicher, dass dein Telefon mit der DBLG2-App kompatibel ist, bevor du die Nutzung von DBLG1 einstellst.

Der Tag des Übergangs: Lass uns anfangen!

Was du am Tag des Übergangs brauchst

Bevor du mit dem Übergang beginnst, stelle sicher, dass du die folgenden Gegenstände bereitliegen hast.


- Dein Smartphone (kompatibel mit der DBLG2-App).
- Eine aktive Internetverbindung (WLAN oder mobile Daten), um die neue Konfiguration der App zu initialisieren.
- Dein neues Rezept zusammen mit dem neuen Aktivierungscode.
- Einen Dexcom G7 Sensor.
- Die zwei derzeit verwendeten Kaleido-Pumpen.
- Eine neue und befüllte Kartusche sowie ein neues Infusionsset.




Wenn der Dexcom G7 mit der DBLG2-App verwendet wird, kann er nicht mit der Dexcom-App verwendet werden. Um Systemkonflikte zu vermeiden, lösche die Dexcom-App von deinem Telefon.

Schritt 1: Lade die DBLG2-Anwendung auf dein Smartphone herunter

Lade die DBLG2-App über den offiziellen App Store herunter (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diabeloop.dblg2>), vorausgesetzt, du hast ein kompatibles Smartphone.

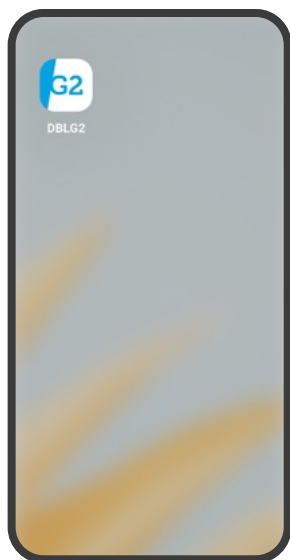

Nach dem erfolgreichen Download wird das App-Symbol auf dem Smartphone angezeigt.

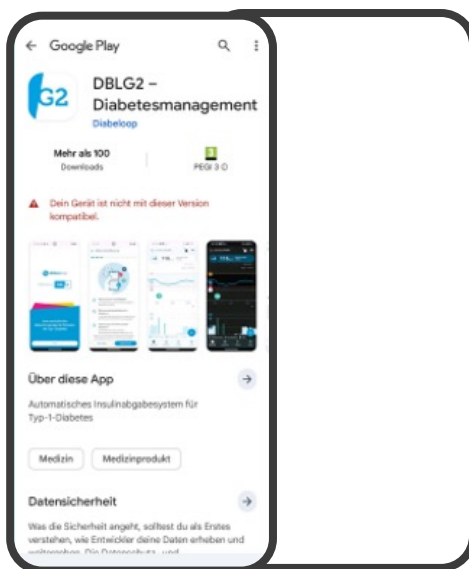

Wenn dein Telefon nicht kompatibel ist, erscheint die App möglicherweise nicht in deinen Suchergebnissen, oder der App Store zeigt eine Warnmeldung an, wie unten dargestellt.

Schritt 2: Erfasse deine medizinischen Informationen

Um dein DBLG2 einzurichten, benötigst du deine aktuellen medizinischen Einstellungen. Du kannst diese Informationen entweder von YourLoops (<https://www.your-loops.com/login>) oder direkt von deinem DBLG1 abrufen.

- Melde dich bei YourLoops mit derselben E-Mail-Adresse und demselben Passwort an, die du für dein DBLG1 verwendet hast, gehe dann auf die Registerkarte „Geräte“ und wähle „Einstellungen“. Du benötigst diese Einstellungen, um die DBLG2-App zu initialisieren. Wir empfehlen, den Bericht über das Symbol „Download Bericht“ als PDF herunterzuladen oder die Informationen in ein Dokument zu kopieren und sie für zukünftige Referenzen zu speichern oder auszudrucken. Wenn du keine elektronische Kopie aufbewahren kannst, trage die Informationen manuell in die unten bereitgestellten Tabellen ein.
- Alternativ kannst du die erforderlichen Informationen direkt von deinem DBLG1 abrufen (siehe die Tabellen unten).

Hier scannen, um auf YourLoops zuzugreifen:



Medizinische Informationen, die während der DBLG2-Initialisierung auszufüllen sind Verfahren einzuhalten.

	Wert		Wo zu finden in DBLG1	Wo einzutragen in DBLG2
E-Mail-Adresse	_____		Hauptmenü > Einstellungen > DBLG1 > Zugangsdaten > YourLoops	DBLG2-Authentifizierung / Anmeldung bei Diabeloop
Passwort	_____		oder auf der YourLoops-Website	


	Wert	Einheit	Wo zu finden in DBLG1	Wo einzutragen in DBLG2
Körpergewicht	_____	kg	Hauptmenü > Einstellungen > Medizinisch > Patient > Körpergewicht & Größe	Medizinische Informationen
Körpergröße(TGD)	_____	cm		
Tagesgesamtdosis (TGD)	_____	Einheiten	Hauptmenü > Einstellungen > Medizinisch > Patient > Tages-Gesamt-Insulindosis	
Frühstück	_____	g	Hauptmenü > Einstellungen > Medizinisch > Patient > Typische Mahlzeiten (Mittelsgröße)	Mahlzeitengröße
Mittagessen	_____	g		
Abendessen	_____	g		
Hyperglykämie-Schwellenwert	_____	mg/dl oder mmol/l	Hauptmenü > Einstellungen > Medizinisch > Schwellenwerte	Ziel- & Schwellenwerte
Hypoglykämie-Schwellenwert	_____	mg/dl oder mmol/l		
Glukose-Zielwert	_____	mg/dl oder mmol/l	Hauptmenü > Einstellungen > Medizinisch > Loop-Modus	

Start	Ende	U/h	Wo zu finden in DBLG1	Wo einzutragen in DBLG2
Sicherheits-Basalrate	_____	_____	Hauptmenü > Einstellungen > Medizinisch > Patient > Sicherheits-Basalrate	Sicherheits-Basalrate

Medizinische Informationen, die für die DBLG2-Nutzung (nach der Initialisierung) auszufüllen sind

Einstellungsname in DBLG2	Wert	Einheit	Wo zu finden in DBLG1	Wo einzutragen in DBLG2
Aggressivität bei Normoglykämie	_____	%		
Aggressivität bei Hyperglykämie	_____	%		
Aggressivität für Frühstück	_____	%	Hauptmenü > Einstellungen > Medizinisch > Loop-Modus	Profil > Behandlung
Aggressivität für Mittagessen	_____	%		
Aggressivität für Abendessen	_____	%		
Frühstück - Klein	_____	g		
Frühstück - Groß	_____	g		
Mittagessen - Klein	_____	g	Hauptmenü > Einstellungen > Medizinisch > Patient > Typische Mahlzeiten	Profil > Mahlzeitengröße
Mittagessen - Groß	_____	g		
Abendessen - Klein	_____	g		
Abendessen - Groß	_____	g		


Schritt 3: Stoppe und „vergesse“ deine Pumpen auf dem DBLG1

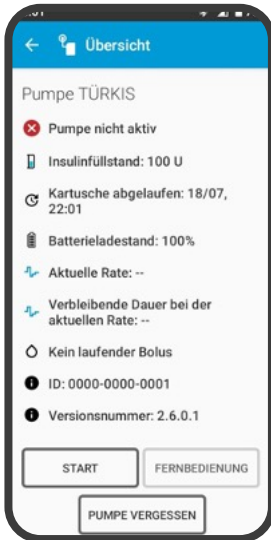

- Tippe im Pumpenbereich auf dem Systemstatus-Bildschirm auf Mehr > Stop. Sobald sie gestoppt ist, tippe auf Pumpe vergessen und bestätige. Warte auf die Meldung „Keine Pumpe gekoppelt“ (die Pumpe piept zweimal). Entferne die Ampulle (die Pumpe piept erneut zweimal).
- Setze die Pumpe auf die Ladestation und **stelle sicher, dass die Ladeanzeige aufleuchtet**.

Hast du Probleme beim Laden deiner Pumpe?

Lass deine Pumpe mindestens 10 Minuten auf der Ladestation liegen. Wenn die Kontrollleuchte nach dieser Zeit immer noch nicht aufleuchtet, wende dich an dein lokales Support-Team, um Unterstützung zu erhalten.

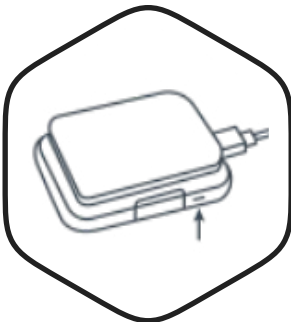


- Wiederhole den Vorgang „Pumpe vergessen“ mit der zweiten Pumpe. Setze dazu eine Ampulle in die zweite Pumpe ein (Du kannst dieselbe Ampulle wie in der vorherigen Pumpe wiederverwenden) und verbinde die zweite Pumpe mit dem DBLG1. Sobald sie verbunden ist, tippe wie zuvor erklärt auf *Mehr > Stop*, dann auf Pumpe vergessen und bestätige. Warte auf die Meldung „Keine Pumpe gekoppelt“ (die Pumpe piept zweimal). Entferne die Ampulle (die Pumpe piept erneut zweimal). **Hinweis:** Wenn du die Pumpen auf dem DBLG1 nicht löschen kannst, ist es möglich, sie später in der DBLG2-App freizuschalten (siehe Schritt 7 unten).
- Lass deinen Dexcom G6 Sensor an deinem Körper und stelle sicher, dass die aktuelle Sitzung aktiv bleibt. **Schalte dein DBLG1-Handset aus, ohne** die Dexcom G6-Sitzung zu stoppen.


Schritt 4: Initialisiere deine DBLG2-Anwendung




- Bevor du die DBLG2-Anwendung startest, musst du sicherstellen, **dass dein Smartphone mit dem Internet verbunden ist (WLAN oder mobiles Netzwerk)**.
- Während der Initialisierung musst du den Bildschirm **ganz nach unten scrollen, um zum nächsten zu gelangen**.

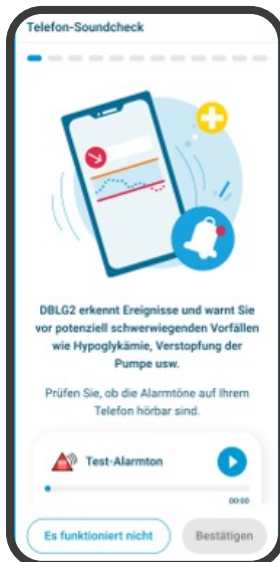


- **Teste den Ton auf deinem Telefon, um sicherzustellen, dass Alarmer hörbar sind.**
Hinweis: Du musst bis zum Ende des Tests warten, bevor du auf „Bestätigen“ tippen kannst.

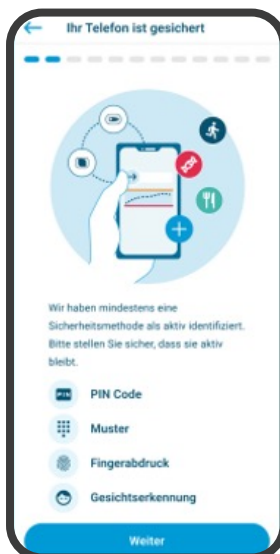

- **Stelle sicher, dass dein Telefon geschützt/gesichert ist.**

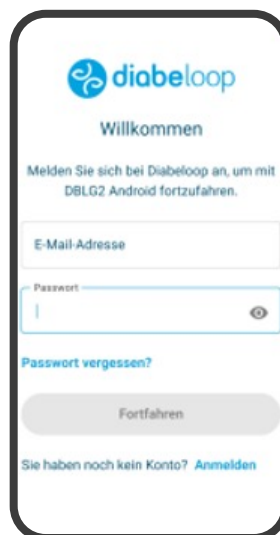


- **Tippe auf „Anmelden“ und gib deinen Login (E-Mail) und das Passwort ein, das du im DBLG1/YourLoops hattest.**

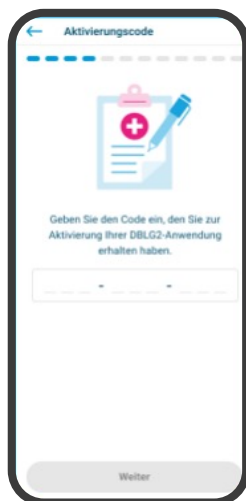


- **Gib deinen Aktivierungscode ein**

Hinweis: Wenn du bei diesem Schritt feststeckst, wende dich bitte an deinen Support vor Ort. Es könnte ein Fehler bei der Erstellung deines Codes aufgetreten sein, und das Team kann dir helfen, diesen schnell zu beheben.

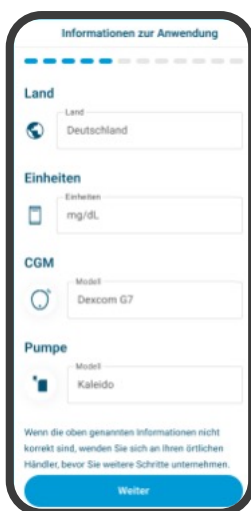

- **Überprüfe deine Systemkomponenten**

Hinweis: Wenn eine Komponente fehlerhaft erscheint, wende dich bitte an deinen Support vor Ort.

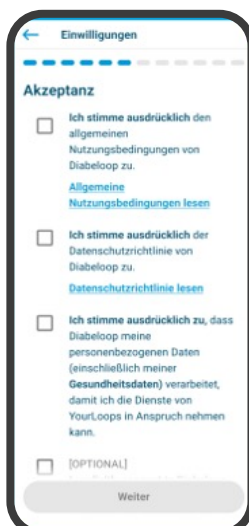

- **Lies und akzeptiere die allgemeinen Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie.**

- **Gib deine persönlichen Daten ein**


- **Gib deine medizinischen Daten sorgfältig basierend auf deinen Einstellungen im DBLG1 ein. Du solltest dich an den Tabellen aus Schritt 2 orientieren, um dich bei diesem Vorgang zu unterstützen.**

- **Wähle deine Insulinart aus und tippe auf „Weiter“. Du kannst deine Insulinart zu einem späteren Zeitpunkt ändern, falls erforderlich.**

Hast du Probleme beim Laden deiner Pumpe?




Lass deine Pumpe mindestens 10 Minuten auf der Ladestation liegen. Wenn die Kontrollleuchte nach dieser Zeit immer noch nicht aufleuchtet, wende dich an dein lokales Support-Team, um Unterstützung zu erhalten.

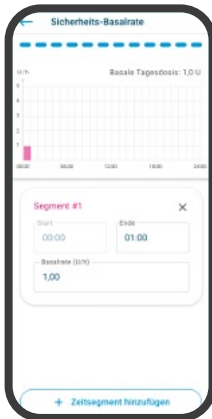

- **Gib deine Sicherheits-Basalrate ein. Ein Zeitsegment kann mehrere Stunden umfassen. Die maximale Anzahl von Segmenten ist 24.** Wenn der Loop-Modus ausgeschaltet ist, wechselt das DBLG2-System zu dieser Sicherheits- Basaltherapie.



- **Gewähre alle erforderlichen Berechtigungen (z. B. Aufhebung des Nicht-Stören-Modus, uneingeschränkte Nutzung des Akkus) und tippen auf „Weiter“.**

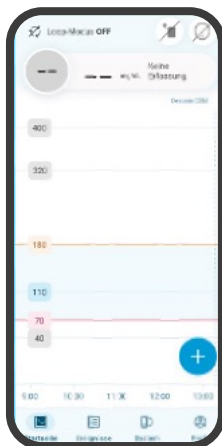

- **Sobald die Initialisierung abgeschlossen ist, siehst du den Startbildschirm ohne Daten.**

Gute Praktiken mit DBLG2

Befolge die unten stehenden Empfehlungen und Anweisungen, da die DBLG2-App andernfalls einen Alarm auslösen kann oder ihre Nutzung blockiert werden könnte.

Bluetooth® immer ON

Schalte Bluetooth® niemals aus, da es für die Kommunikation der App mit der Pumpe und dem Sensor unerlässlich ist. Das Ausschalten von Bluetooth® löst einen Alarm aus (63000).

Telefon immer gesichert

Entferne die Sicherheitsmaßnahmen auf deinem Telefon nicht (z. B. Code, biometrische Identifizierung, Gesichtserkennung usw.). Achte darauf, dass du dein Telefon sperrst, wenn du es nicht benutzt, um eine unerwünschte Nutzung zu verhindern.

Benachrichtigungen immer ON

Deaktiviere die Benachrichtigungen DBLG2 und Dexcom G7 nicht, da dies die Ausführung der App verhindern würde. Benachrichtigungen ermöglichen dir, das System richtig zu nutzen und warnen dich bei Eintreten wichtiger Ereignisse.

Telefon mit automatischen Zeiteinstellungen

Ändere nicht die automatische Zeiteinstellung deines Telefons. Die Umstellung von automatischer Zeit auf manuelle Zeit löst einen Alarm aus (64000). Die automatische Zeiteinstellung sorgt für einen einheitlichen Betrieb zwischen CGM, Pumpe und App.

Aktive Internetverbindung: WLAN oder mobile Daten

Eine aktive Internetverbindung (WLAN oder mobil Daten) ist erforderlich, um die App zu initialisieren. Im Anschluss daran ist ein regulärer Internetzugang erforderlich, damit deine medizinischen Daten auf YourLoops hochgeladen werden können und deine App aktiv bleibt. Wenn du deine mobil Daten nicht nutzen möchtest (Verbrauch von ca. 0,05 GB pro Monat), wählst du WLAN als bevorzugte Methode für die Übertragung deiner medizinischen Daten.

Aktualisiere dein Telefon nicht auf eine nicht unterstützte Betriebssystemversion

Updates des Betriebssystems deines Telefons können sich auf deine Telefoneinstellungen auswirken oder die App herunterfahren. Überprüfe immer die Kompatibilität des Betriebssystems, bevor du ein manuelles Update durchführst, und überprüfe danach die Telefoneinstellungen.

Anwendungsdaten nie gelöscht


Lösche niemals die App-Daten. Wenn du die App-Daten löschst, müsst du die App neu starten und sie neu initialisieren.

Keine Akku-Einschränkungen

Stelle sicher, dass die Optimierung des Akkus für die DBLG2 -App auf deinem Telefon nicht aktiviert ist. DBLG2 muss jederzeit im Hintergrund laufen können.

Schritt 5: Vervollständige deine Profilkonfiguration


Sobald die Initialisierung abgeschlossen ist und bevor du Geräte koppelst, gib die restlichen gesammelten Daten (Aggressivitätsfaktoren, Frühstück, Mittagessen, Abendessen) in den entsprechenden Abschnitten des Profil-Menüs ein.

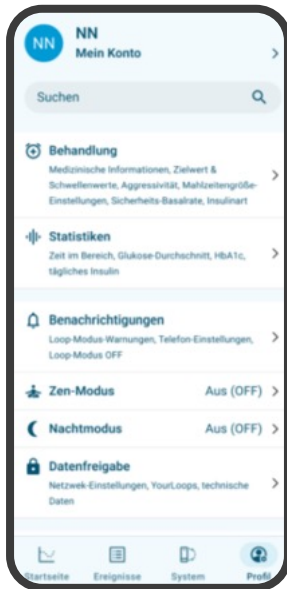


- Gehe zu Profil > Behandlung und gib die anderen medizinischen Informationen aus dem DBLG1 ein (Aggressivitätsfaktoren, Mahlzeitengrößen).
Du solltest dich an der Tabelle in Schritt 2 orientieren, um dich bei diesem Vorgang zu unterstützen.

Die DBLG2-App wird mit der Standardkonfiguration geladen. Wenn du dein System anpassen möchtest (zum Beispiel Nachtmodus, Datenfreigabe, Zen-Modus...), kannst du das über den Profil-Bildschirm tun. Wenn du Einstellungen auf dem DBLG1 angepasst hattest, werden diese nicht automatisch auf das neue System übertragen. Du musst die Einstellungen erneut anpassen.


Schritt 6: Kopple den Dexcom G7 auf dem DBLG2

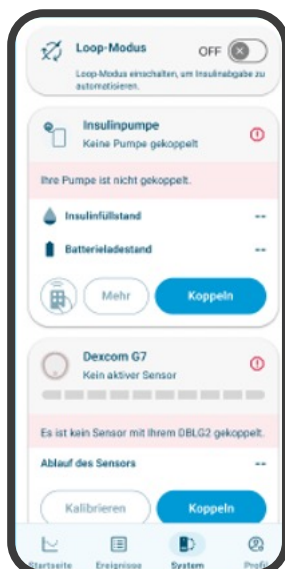


- Falls noch nicht geschehen, lösche die Dexcom-App von deinem Telefon.
- Tippe unten auf dem Bildschirm auf System > Abschnitt Dexcom G7 > Koppeln

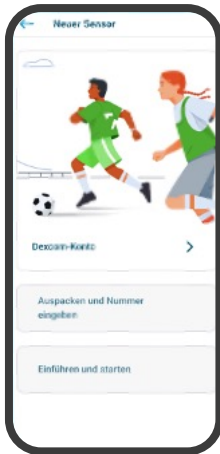


- Tippe auf **Dexcom-Konto**. Melde dich bei deinem Dexcom-Konto mit einer gültigen E-Mail-Adresse und deinem Passwort an. Wenn du noch kein Konto hast, tippe auf Konto erstellen und folge den Anweisungen von Dexcom

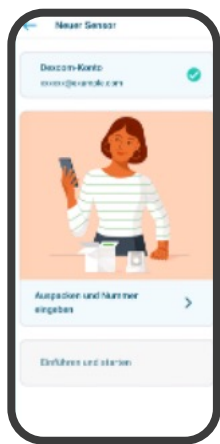


- Tippe auf **Auspacken und Nummer eingeben**. Sobald du deinen G7 ausgepackt hast, tippe auf **Weiter**. Gib die Sensor-Nummer ein, die auf dem Applikator angezeigt wird, und tippe auf **Geben Sie**.

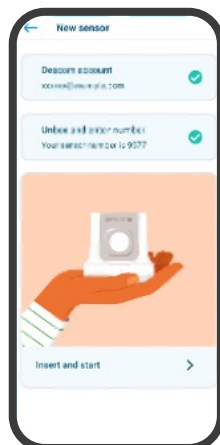

- Tippe auf **Einführen und starten**. Fahre dann mit dem Einführen deines Sensors fort, wie auf dem Bildschirm unter „**Sensor starten**“ beschrieben. Nachdem dein Sensor an deinem Körper angebracht ist und du auf **Verbinden** getippt hast, leitet die App die Verbindung mit dem Sensor ein.

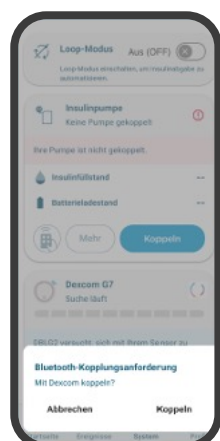


- Der Verbindungsaufbau kann bis zu 30 Minuten dauern. Halte dein Telefon nah bei dir. Du wirst während dieser Zeit keine Messwerte, Alarme oder Warnungen von Deinem G7 erhalten. Du kannst auf „**Verstanden**“ tippen, um diesen Bildschirm zu schließen, während die Verbindung aufgebaut wird. Achte auf die Benachrichtigung, die dich auffordert, das Koppeln zu autorisieren. Der Status des Sensors auf dem Bildschirm System wechselt zu Suche läuft.

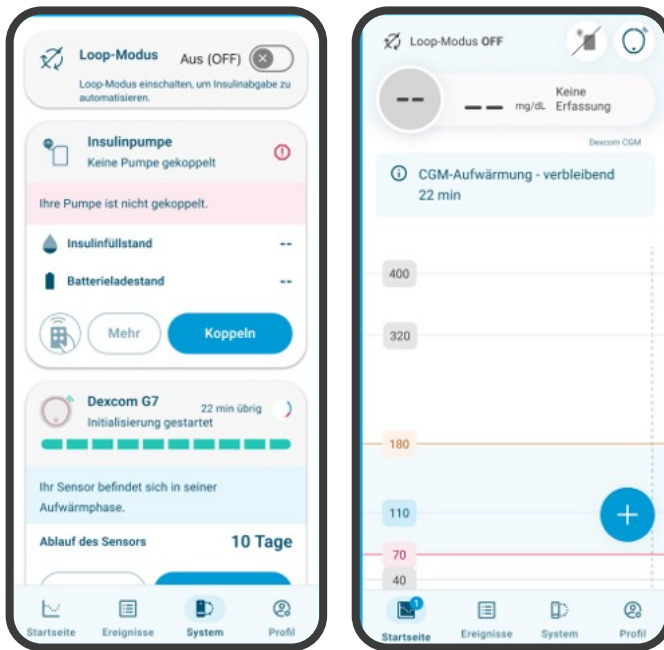

- Sobald deine DBLG2-Anwendung mit dem Sensor gekoppelt ist, startet der Sensor seine Aufwärmphase. Dies dauert etwa 30 Minuten ab dem Moment, in dem der Sensor in deinen Körper eingeführt wurde. Der Startbildschirm und der System-Bildschirm zeigen einen Aufwärm-Countdown an.
- **Entferne den Dexcom G6-Sensor von deinem Körper, während du darauf wartest, dass der G7 seine Aufwärmphase abschließt.**
- Sobald das Aufwärmen abgeschlossen ist, wird dein Glukosewert auf dem DBLG2-Startbildschirm angezeigt.

Schritt 7: Kopple die Kaleido-Pumpe auf dem DBLG2

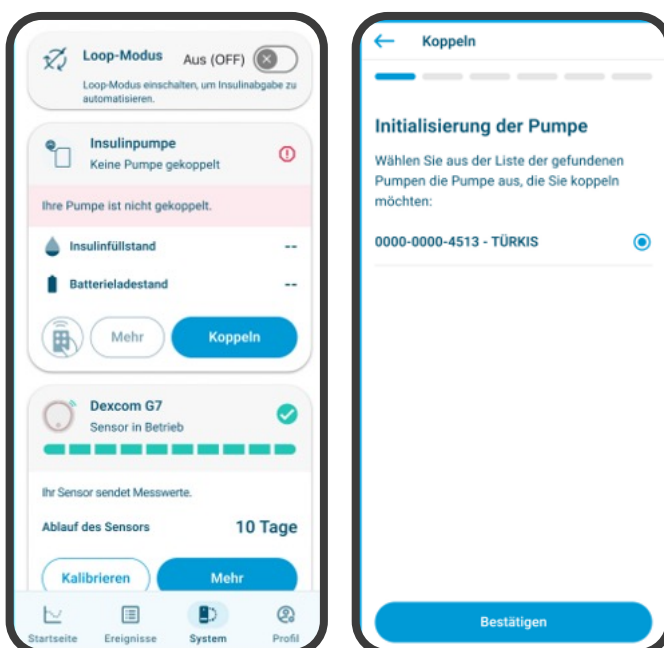

- **Verwende die Pumpe, die zuvor nicht benutzt wurde.** Setze eine neue, vollständig gefüllte Kartusche in die voll aufgeladene Pumpe ein. Verbinde die Pumpe mit dem Infusionsset und stelle sicher, dass dein Smartphone innerhalb von 50 cm Reichweite bleibt.
- Tippe im Abschnitt Pumpe auf dem Bildschirm System auf **Koppeln**. Warte, bis die Pumpe in der Liste der Pumpen erscheint. Wähle die Pumpe aus und bestätige. Tippe auf Koppeln beim System-Pop-up „Bluetooth-Kopplungsanforderung“ unten auf dem Bildschirm.
- Folge den Kopplungsschritten auf dem Bildschirm.


Du kannst die Pumpen nicht aus dem DBLG1 entfernen? (Schritte 0 und 3)

?

Folge dem Verfahren „Pumpe entriegeln“ auf dem DBLG2. Tippe auf *Profil > Hilfe und Kontakt > Entriegeln* Sie Ihre Pumpe. Folge dem Verfahren in der App.

Am Ende des Prozesses zeigt die App die Meldung „Ihre Pumpe ist entriegelt“ an. Tippe auf System, um zum System-Bildschirm weitergeleitet zu werden, damit du deine Pumpe koppeln kannst.

Schritt 8: Starte den Loop-Modus

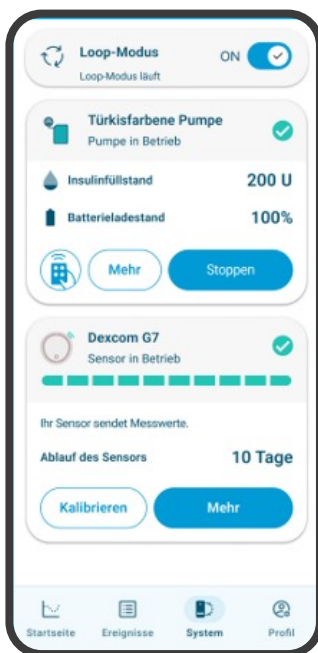

- Gehe zum System-Bildschirm und stelle sicher, dass dein Sensor in Betrieb ist und deine Insulinpumpe abgibt.
- Wenn du gerade eine Mahlzeitbolus oder einen Korrekturbolus hattest, trage dies unter *Startseite > + > Pen-Bolus* mit der korrekten Uhrzeit ein. Alternativ, falls du es nicht protokollieren möchtest, warte mindestens 3 Stunden, bevor du den Loop-Modus einschaltest (ON).



KRITISCHE SICHERHEITSKONTROLLE: Du musst absolut sicher sein, dass dein altes DBLG1-Handset ausgeschaltet bleibt, bevor du den Loop-Modus auf deinem neuen System startest.

- Herzlichen Glückwunsch, du bist bereit, den Loop-Modus zu starten!
Schalte den Loop-Modus im oberen Teil des Bildschirms ein (ON).

Dieses Dokument basiert auf Inhalten, die ursprünglich von Diabeloop entwickelt wurden (Dokumentenummer: DBLG2-ED-ME-006-de-Rev1). Die Inhalte wurden mit aktualisiertem Branding und aktualisierter Formatierung für die Verwendung in diesem Dokument übernommen.



Dieses Memobezieht sich ausschließlich auf kommerzielle Konfigurationen des DBLG1/DBLG2-System. DBLG1/DBLG2-Systemist nur auf Rezept erhältlich. Das Benutzerhandbuch ist das Referenzdokument für eine sichere Verwendung des Systems. DBLG1/DBLG2-Systemist ein CE-gezeichnetes Medizinprodukt (außer für Konfigurationen, die ausschließlich für klinische Forschungszwecke genutzt werden). Abbildungen können je nach verwendeter Konfiguration des DBLG1/DBLG2-Systems.



Kaleido-Erklärung

Das Kaleido-Produkt ist für die kontinuierliche subkutane Abgabe von Insulin mit festgelegten und variablen Raten für die Behandlung von Diabetes mellitus bei erwachsenen Personen vorgesehen, die auf Rezept von medizinischem Fachpersonal Insulin benötigen.

Kaleido ist CE-zertifiziert und in allen teilnehmenden Ländern und Staaten erhältlich. Kaleido®, Kaleido Care® und ViCentra® sind eingetragene Marken von ViCentra B.V. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung dieser Marken durch ViCentra B.V. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer. Diabeloop® YourLoops, DBLG1 und DBLG2 sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Diabeloop SA in Europa und/oder in anderen Ländern. Das DBLG2-System ist nur mit ärztlicher Verordnung erhältlich. Das DBLG2-System ist nur für Erwachsene indiziert. Das DBLG2-System ist ein mit CE gekennzeichnetes Medizinprodukt (außer bei Konfigurationen, die ausschließlich während klinischer Untersuchungen verwendet werden). Die Abbildungen können je nach Konfiguration des DBLG2-Systems variieren. Bitte beachte, dass das Benutzerhandbuch für das Medizinprodukt das wichtigste Dokument für den sicheren Betrieb des Systems ist.



Hersteller: ViCentra B.V.
Adresse: Rijnzathe 6
3454 PV Utrecht
die Niederlande
Telefon: +31 (0) 88 3232 871
E-Mail: hello@hellokaleido.com
Website: hellokaleido.com