


Anwendung (Tape) | How to use (Tape)


- 1** **Reiße das Trägerpapier durch Dehnung auseinander und entferne es**
Tear the backing paper by stretching it and remove it



- 2** **Platziere das Tape über dem Sensor / der Pumpe**
Apply the exposed adhesive over your device

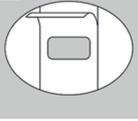

- 3** **Entferne das restliche Trägerpapier und drücke das Tape anschließend gut auf die Haut**
Remove the remaining packing and press rest of the tape onto your skin

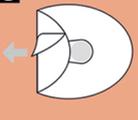

- 4** **Warte mind. eine Stunde vor sportlichen Aktivitäten oder Wasserkontakt**
Give the tape at least one hour to adhere



Bei transparenten Tapes / Only for clear tapes

- 4 B** **Entferne anschließend die Schutzfolie auf der Vorderseite. Warte mind. eine Stunde vor sportlichen Aktivitäten oder Wasserkontakt**
Remove the protective film on the front. Give the tape at least one hour to adhere



Abbildungen können je nach Gerät abweichend sein

Anwendung (Sensoreinfassung) | How to use (sensor frame)

- **Der Sensor wird wie gewohnt an der gewünschten Stelle angebracht**
Please attach the sensor to your desired area
- **Klebe das Fixierungspflaster um die Sensoreinfassung, sodass dieses die Flügel komplett bedeckt**
Stick the tape around the sensor frame until the wings are covered
- **Klebe die Sensoreinfassung inklusive Pflaster über den angebrachten Sensor**
Put the sensor frame including patch over the attached sensor

Die Halterung überdeckt das Original-Pflaster, sodass diese jederzeit ohne Probleme gewechselt werden kann. Durch das flexible Material ist die Sensoreinfassung angenehm zu tragen und kaum spürbar. Passende Pflaster können unter www.diasticker.de erworben werden. | The holder covers the original patch so that it can be changed at any time without problems. Due to the flexible material, the sensor frame is comfortable to wear and hardly noticeable. Appropriate patches can be purchased at www.diasticker.de.

Hinweise | Advices

- **Nicht auf gereizte / verletzte Haut aufbringen**
Do not apply the tape on damaged / irritated skin
- **Treten Hautirritationen auf, ist das Tape umgehend zu entfernen**
If any type of irritation occurs, remove tape immediately
- **Stelle sicher, dass die Haut vor der Nutzung sauber und trocken ist**
Make sure your skin is clean and dry
- **Entferne, falls nötig, Körperbehaarung**
Remove excess body hair, if necessary
- **Benutze vorab keine rückfettenden Pflegemittel**
Before using, make sure your skin is free of lotions or cremes. Do not use moisturizers
- **Stark haftendes Tape kann mit Hilfe von z.B. Babyöl gelöst werden**
Strongly adhered tape may be loosened by soaking with e.g. baby oil